



Guía del Usuario de la aguja *Harmony*[®]

Main Office
22320 Foothill Blvd.
Suite 350
Hayward, CA 94541
Ph: 510 888 9090
F: 510 888 9099

Sales & Marketing
480 Sawgrass Corporate Pkwy.
Suite 120
Sunrise, FL 33325
Ph: 954 689 9280
F: 954 689 9289



Tapa integrada para remover la costra del sitio del ojal asépticamente



Limpiar el sitio del ojal de acuerdo con las políticas de la clínica.



Rasgue el empaque y remueva la aguja Harmony[®] de JMS, inspeccione por daños y partículas en el lumen.



Sin remover la tapa de la aguja, agarre las alas y la tapa entre el dedo pulgar y el índice.



Remover con la punta de la tapa, las costras que se han desarrollado en el sitio del ojal.

Antes de la canulación, repita el procedimiento de desinfección de acuerdo con las políticas de la clínica.



Remueva la tapa.



Alinee la aguja Harmony[®] de JMS, con el biselado hacia arriba, sobre el sitio del ojal.



Con precaución, inserte la aguja Harmony[®] de JMS en el ojal establecido y asegúrese de que el mismo ángulo y profundidad sean usados consistentemente durante cada canulación.



Observe la pulsación de la sangre en la tubería de la aguja Harmony[®] de JMS cuando este en el acceso.



Asegure la aguja Harmony[®] de JMS con adhesivo de acuerdo con las políticas de la clínica.

